

Heroin-Reinheitstest

Der MMC-Heroin-Reinheitstest ist ein Schnelltest für Heroin, der Aufschluss über dessen Reinheit gibt. Mit diesem Test können Sie herausfinden, ob und wie stark das Heroin gestreckt wurde. Dealer strecken Heroin, um ihre Gewinnspanne zu erhöhen. Die zum "Schneiden" verwendeten Substanzen sind im Allgemeinen harmlos, aber es kommt vor, dass möglicherweise gefährliche Substanzen hinzugefügt werden.

Als allgemeine Richtlinie bedeutet ein hoher Prozentsatz an Heroin in der Probe, dass man nahe an der Hauptquelle ist und der Anteil an gefährlichen Verfälschungen geringer ist. Dieser Test sagt nichts über die Verfälschungsmittel aus, mit denen die Probe geschnitten wurde.

Inhalt

- 10 Ampullentests
- 10 Spatel
- 1 Gebrauchsanweisung

Anweisungen

- Bereiten Sie eine kleine Linie der Probe auf dem Testfeld in der unteren rechten Ecke vor, so dass sie genau mit Pulver bedeckt ist (ca. 20 mg); ODER verwenden Sie einen mitgelieferten Spatel und bedecken Sie die Spatelkelle mit dem Pulver (ca. 20 mg). Für die besten Ergebnisse wiegen Sie 20 mg der Probe auf einer Waage ab.
- Vergewissern Sie sich, dass das Pulver keine Klumpen ("Steine") enthält, da dies die Ergebnisse des Tests beeinflussen könnte.
- Öffnen Sie die Ampulle mit dem Ampullenbrecher, der sich oben auf jeder Testampulle befindet.
- Geben Sie das Pulver (ca. 20 mg) in die Testampulle. Wenn Sie auf einer Waage wiegen, können Sie ein Stück Papier falten, um zu verhindern, dass das Pulver verschüttet wird.
- Verwenden Sie den Spatel, um die Lösung etwa 10 Sekunden lang gut umzurühren. Achten Sie darauf, den Spatel nicht in der Ampulle zu lassen, da er sonst schmelzen würde.
- Lassen Sie die Ampulle 5 Minuten stehen; die Farbe wird langsam dunkler.
- Schütteln Sie die Ampulle vorsichtig 5 Sekunden lang, damit die Farbe homogen wird.
- · Schauen Sie sich die Einfärbung der obersten Schicht an und vergleichen Sie die Farbe mit diesem Merkblatt.
- · Nach Gebrauch: entsorgen Sie den Test ordnungsgemäß.

Haftungsausschluss

Die Verwendung dieses Tests erfolgt auf eigene Gefahr. Dies ist ein präsumtiver Test. Aus diesem Test können keine Rechte oder Ansprüche abgeleitet werden. Der Hersteller/Lieferant haftet nicht für Schäden und/ oder Zwischenfälle, die sich aus diesem Test ergeben.

Warnung

Nicht einnehmen. Dämpfe nicht einatmen. Nicht in Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung bringen. Möglicherweise irreversible Wirkungen. Unter Verschluss und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Bei Augenkontakt: mit viel Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Bei Zwischenfällen oder Unwohlsein: sofort ärztlichen Rat einholen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.





Version 1.0 | 11/2022

coloprint GmbH | Giesenheide 40 | D-40724 Hilden | www.coloprint.de | Seite 1