

# Kokain-Reinheitstest

Der MMC-Kokain-Reinheitstest ist ein Schnelltest für Kokain, der Aufschluss über die Reinheit des Kokains gibt. Mit diesem Test können Sie herausfinden, ob und wie stark das Kokain gestreckt wurde.

Dealer strecken Kokain, um ihre Gewinnspanne zu erhöhen. Die zum "Schneiden" verwendeten Substanzen sind in der Regel harmlos, aber es kommt vor, dass möglicherweise gefährliche Substanzen hinzugefügt werden. Als allgemeine Richtlinie kann man sagen, dass ein hoher Prozentsatz an Kokain in der Probe nahe an der Hauptquelle liegt und der Anteil an gefährlichen Verfälschungen geringer ist. Dieser Test sagt nichts über die Verfälschungsmittel aus, mit denen die Probe gestreckt wurde.

## Inhalt

- 10 Kokain-Reinheitsampullentests + 10 Kunststoffampullen mit der Pufferlösung
- 10 Spatel
- 1 Gebrauchsanweisung

## Anweisungen






- Bereiten Sie eine Linie der Probe auf dem Testfeld in der unteren rechten Ecke dieser Anleitung vor, so dass sie mit Pulver (ca. 20 mg) bedeckt ist; ODER verwenden Sie einen mitgelieferten Spatel und bedecken Sie die Spatelkelle mit dem Pulver (ca. 20 mg). Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie eine Waage, um 20 mg abzuwiegen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Pulver keine Klumpen ("Steine") enthält, da dies die Ergebnisse des Tests beeinflussen könnte.
- Öffnen Sie die Ampulle mit dem Ampullenaufbrecher, der sich oben auf jeder Testampulle befindet.
- Öffnen Sie ein Pufferlösungsrohrchen und geben Sie die gesamte Flüssigkeit in die Testampulle.
- Geben Sie das Pulver (ca. 20 mg) in die Testampulle.
- Schütteln Sie die Testampulle langsam 5 Sekunden lang.
- Schauen Sie sich die Einfärbung der unteren Ebene an und vergleichen Sie die Farbe mit diesem Anleitungsblatt.
- Nach Gebrauch: entsorgen Sie den Test ordnungsgemäß.

## Haftungsausschluss

Die Verwendung dieses Tests erfolgt auf eigene Gefahr. Dies ist ein präsumtiver Test. Aus diesem Test können keine Rechte oder Ansprüche abgeleitet werden. Der Hersteller/Lieferant haftet nicht für Schäden und/oder Zwischenfälle, die sich aus diesem Test ergeben.

## Warnung

Nicht einnehmen. Dämpfe nicht einatmen. Nicht in Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung bringen. Möglicherweise irreversible Wirkungen. Unter Verschluss und für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Bei Augenkontakt: mit viel Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Bei Zwischenfällen oder Unwohlsein: sofort ärztlichen Rat einholen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

	★	1 Stern – sehr geringer Kokaingehalt
	★★	2 Sterne – geringer Kokaingehalt
	★★★	3 Sterne – mittlerer Kokaingehalt
	★★★★	4 Sterne – hoher Kokaingehalt
	★★★★★	5 Sterne – sehr hoher Kokaingehalt

